

Visiera Protettiva "Back to School"

Manuale di Uso e Manutenzione

Come indossare la visiera



Come sollevare la visiera



Classificazione: la visiera mod. Back to School è un dispositivo generico conforme alla direttiva 2001/95/CE

Sterilizzazione: la visiera deve essere sterilizzata mediante raggi gamma, ipoclorito di sodio, perossido di idrogeno, IPA, ETO o ozonizzazione.

Manutenzione: la visiera deve essere pulita con regolarità, utilizzando un panno inumidito con un detergente delicato, asciugare con una pelle scamosciata. Non pulire a secco per evitare di graffiarne la superficie.

Smaltimento: le visiere danneggiate devono essere smaltite opportunamente.

Smaltire il prodotto dopo 5 anni dalla sua data di produzione.

Ricambi e accessori: contattare il fabbricante per informazioni aggiuntive sul prodotto, su ricambi e accessori.

Conservazione: conservare la visiera in un luogo asciutto e lontano dalle radiazioni solari. La visiera dovrebbe essere trasportata e conservata nella sua confezione originale alla temperatura di 5° ~ 40°C, con umidità < 80%.

AVVERTENZE:

- Sostituire immediatamente se ci sono segni di danneggiamento, inclusi segni sulla visiera
- Non modificare o alterare il prodotto
- I materiali che vengono a contatto con la pelle dell'utilizzatore possono causare reazioni allergiche nei soggetti più sensibili
- Assicurarsi che la visiera venga indossata in sicurezza e che sia posizionata in maniera corretta a protezione degli occhi e del viso dell'utilizzatore.
- I protettori dell'occhio contro le particelle ad alta velocità indossati sopra gli occhiali oftalmici possono trasmettere impatti, generando pericoli per l'utilizzatore.